

MASQUE BARRIÈRE GRAND PUBLIC CATÉGORIE 1

FICHE TECHNIQUE MASQUE B EN JACQUARD CLOQUÉ

Références : F08003 et F43118

Descriptif

Conformément à la note d'information interministérielle du 29 mars relative aux nouvelles catégories de masques réservées à des usages non sanitaires, ce masque en jacquard cloqué permet un usage de type masque de **catégorie 1** (masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public). Il ne comporte aucune couture car celui-ci est réalisé en tricotage.

Pour indication, ce masque a été créé par nos soins et une demande de brevet a été déposée.

Il est composé de 2 parties : un rectangle pour protéger le visage et un lien pour permettre de l'attacher. De plus ce masque est lavable à 60°C et **réutilisable 100 fois**. Il est constitué de 2 épaisseurs : une face extérieure en polyamide et une face intérieure en coton + élasthanne.

Composition

55% polyamide
43% coton
2% élasthanne

Caractéristiques techniques

Poids d'un masque: 15 grs ;
Poids au mètre carré : 510 grs ;
Dimensions: environ 20 x 14 cm ;
Épaisseur : 3 mm

Notice d'utilisation



1

2

3

- 1- Enfiler le masque en mettant le côté avec la lanière fermée derrière l'oreille correspondante.
- 2- Saisir les deux extrémités de la lanière situées du côté de l'autre oreille.
- 3- Ajuster le masque puis nouer les deux extrémités de la lanière sous l'oreille.

Attention, veillez à bien appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et à l'ajuster au mieux sur le visage.

Entretien

Lavage à 60°C avec votre lessive habituelle.
Essorage autorisé 800 tours maximum.
Séchage à l'air libre. Sèche-linge non préconisé.
Repassage à 110°C sur la face intérieure.



Conditions d'utilisation

- Ce masque a été testé pour 100 lavages. Après 100 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.
- Il est recommandé d'effectuer un premier lavage du masque avant utilisation et de le changer et de le laver toute les 4 heures.
- Veillez à bien vous laver les mains minutieusement avec du savon ou du gel hydro alcoolique avant chaque manipulation du masque.
- Évitez de toucher le masque et de le déplacer. Ne pas le mettre en position d'attente sur le front ou sur le cou.
- Le port de ce masque nécessite également d'effectuer les gestes barrières et les règles de confinement.
- Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que le masque est en adéquation avec le milieu d'usage.
- En attendant de laver le masque, isolez-le dans un sac en plastique.

Efficacité de filtration et perméabilité à l'air

Les performances de ce masque ont été mesurées par les laboratoires de la DGA Maitrise NRBC situé 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit ainsi que par l'IFTH situé 3 chemin des Mouilles, 69130 Écully.

D'après les rapports d'essais références : **RP/20-2679/DGA MNRBC/2000305/NP**, **RP/20-3025/DGA MNRBC/2000305/NP**, **RP/20-3594/DGA MNRBC/2000305/NP**, **2020-04-14-024-1** et le rapport **RP/20-8822/DGA MNRBC/2000305/NP** **ce masque supporte 100 lavages**. Ce masque a été testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.

- Efficacité de filtration des particules de 3 μm > **93% pour 100 lavages**.
- Perméabilité à l'air pour une dépression de 100 Pa > **137 L.m⁻².s⁻¹ pour 100 lavages**.